

Простота и широкие возможности

Настоящая сила для уверенности



Настоящая сила...

...в желудочно-кишечном тракте и бронхах

Ассортимент электрохирургического оборудования от компании Olympus позволяет врачам проводить рассечение, коагуляцию и резекцию с уверенностью в применении общепризнанных и надежных терапевтических методик.

С учетом специфических потребностей современной электрохирургии, компания Olympus понимает важность наличия безопасного специализированного источника энергии, который способен обеспечить точность, так необходимую врачам в их работе.

Электрохирургический генератор ESG-300 — это специализированный продукт компании Olympus, разработанный с учетом потребностей эндоскопистов. Он позволяет избежать сложности, связанной с использованием универсальных генераторов, и при этом является простым безопасным и интеллектуальным источником энергии.

...отвечает индивидуальным потребностям

Адаптируемость простых режимов работы для проведения всех основных электрохирургических процедур и уверенность в работе для пользователей, знакомых с другими системами.

Электрохирургический генератор ESG-300 можно настраивать для соответствия любым параметрам электрохирургии при проведении как стандартной полипэктомии, так и более сложных процедур (например, эндоскопической диссекции подслизистой [ESD]).

...настраивается специально для вашей работы

Удобная возможность с легкостью сохранять настройки режимов обеспечивает пользователям большую уверенность и безопасность при работе, а также экономит время, устраняя необходимость выбора настроек вручную.



Настоящая сила...

...простым нажатием кнопки

Благодаря простому и интуитивно-понятному интерфейсу с сенсорным экраном пользователи могут с легкостью настраивать систему в соответствии с личными требованиями всего лишь в несколько этапов.

...без подключения проводов

Беспроводная ножная педаль обеспечивает независимость от внешних условий во время работы, что позволяет располагать генератор в более безопасном месте в операционной.

Простое переключение между настройками процедур без использования рук — без необходимости взаимодействовать с генератором вручную — повышает эффективность рабочего процесса.



...направляет ваши действия

Интеллектуальная система вспомогательных сообщений предоставляет простую и понятную обратную связь, позволяя пользователям с уверенностью управлять электрохирургическим генератором ESG-300.

...говорит на вашем языке

Возможность выбора из 29 языков отображения данных означает, что пользователи могут с легкостью управлять системой на понятном им языке без возникновения путаницы.



Настоящая сила...

...и широкие возможности

В комбинации с электрохирургическим генератором ESG-300 можно использовать аргонноплазменный коагулятор (APU-300) для обеспечения наивысшего качества поверхностного гемостаза.

Режим SmartArgon, в котором граница коагуляции не зависит от расстояния между датчиком и тканью, позволяет достигать однородного и безопасного гемостаза с уменьшением карбонизации. Кроме того, возможность ограничивать глубину проникновения плазменного луча делает режим SmartArgon идеальным вариантом выбора для нежных тканей.

В зависимости от целевого участка ткани существуют несколько видов датчиков: латеральный, аксиальный и радиальный, что позволяет проводить точную и селективную коагуляцию.

...основана на опыте

Fast Spark Monitor позволяет измерять интенсивность искрового разряда во время процедур резания, автоматически регулируя выходную мощность для достижения воспроизводимого воздействия на ткань и защиты инструментов EndoTherapy.

High-Power Cut Support — немедленное искровое зажигание позволяет проводить разрезание без первоначальной задержки, что обеспечивает превосходную эффективность разрезания.

Contact Quality Monitor анализирует контактное сопротивление нейтрального электрода, снижая риск нанесения термической травмы пациенту.

Leakage-Protection Sensor измеряет и контролирует утечку тока, сокращая риск причинения непреднамеренного повреждения пациенту или пользователю.

■ **Режимы рассечения**

PureCut (Чистое рассечение)

Режим непрерывного рассечения с низким эффектом коагуляции

PulseCut Slow/Fast (Импульсное рассечение, медленное/быстрое)

Режим прерывистого рассечения, который обычно используется во время эндоскопических процедур

BlendCut (Комбинированный режим рассечения и коагуляции)

Режим непрерывного разрезания с повышенным эффектом коагуляции идеально подходит для рассечения

■ **Режимы коагуляции**

SoftCoag (Мягкая коагуляция)

Медленная и глубокая коагуляция – оптимально подходит для коагуляции толстых кровеносных сосудов

SprayCoag (Спрей-коагуляция)

Бесконтактная коагуляция – оптимально подходит для пероральной эндоскопической миотомии (РОЕМ)

ForcedCoag (Усиленная коагуляция)

Быстрая и эффективная коагуляция

PowerCoag (Мощная коагуляция)

Быстрая и эффективная коагуляция с повышенным уровнем рассечения

High Power Cut Support (HPCS) – для немедленного рассечения
Fast Spark Monitor (FSM) – оптимизированная подача выходной мощности для режимов резания



Режимы аргонплазменной коагуляции

ForcedArgon
(Усиленная аргонплазменная коагуляция)


Непрерывная подача аргонплазменного луча со стабильной выходной мощностью для быстрого и эффективного гемостаза и абляции крупных участков

PulsedArgon Slow/Fast (Импульсная аргонплазменная коагуляция, медленная/быстрая)

Непрерывная подача аргонплазменного луча с прерывистой выходной мощностью для большего контроля воздействия на ткань

SmartArgon (Интеллектуальная аргонплазменная коагуляция)

Автоматически определяет расстояние до ткани и регулирует мощность – особенно подходит для применения на нежных тканях, таких как тонкая кишка

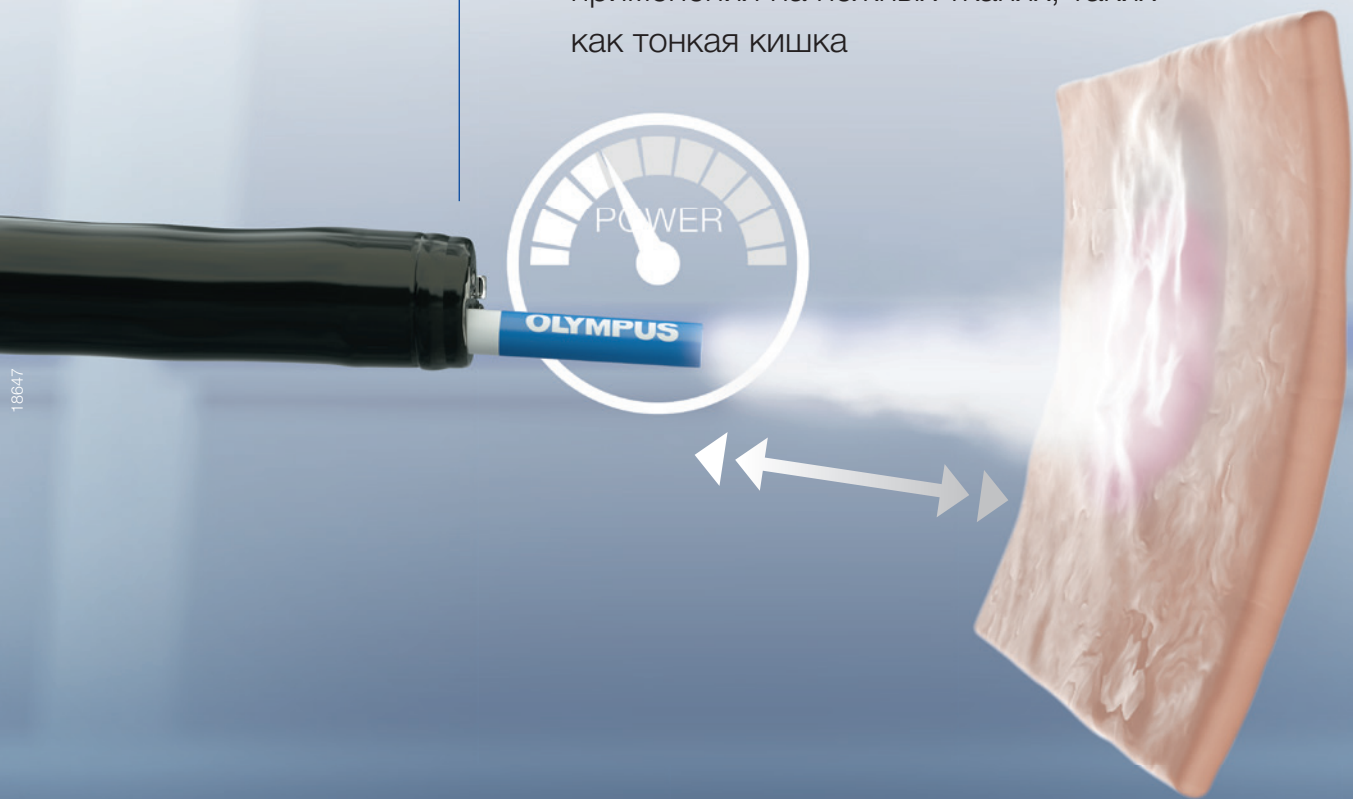

Улучшенный рабочий процесс и практичность

Индивидуальные настройки и процедуры

1-й этап


Создание индивидуальных настроек

2-й этап

Объединение настроек с процедурой

3-й этап

Переключение между настройками нажатием черной кнопки на ножной педали

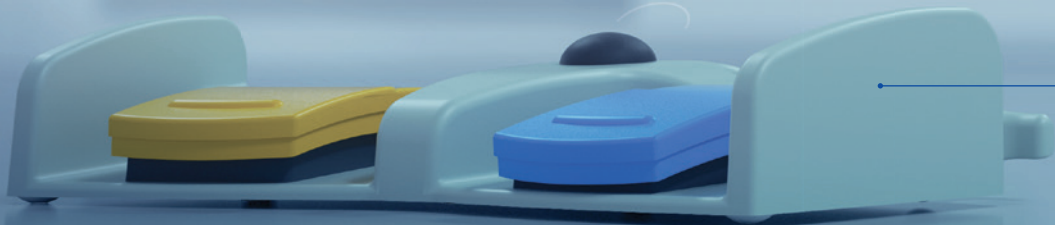

Беспроводная
ножная педаль

ESG-300 — Управлять с легкостью

Электрохирургический генератор (ESG-300)

Выдвижной ящик для принадлежностей и кабелей

Тележка для системы (TC-E300)

Аргоноплазменный коагулятор (APU-300)

Беспроводная ножная педаль

Насос для подачи воды (OFP-2)



15882

Информация о заказе

Компоненты ВЧ-системы

Номер для заказа	Артикул	Описание
WA90003W	ESG-300	Электрохирургический генератор
WA90004W	APU-300	Аргоноплазменный коагулятор
WA94034W	Беспроводная ножная педаль	С приемником и зарядным устройством
WA94033C	Проводная ножная педаль	Кабель, 4 м
K10026806	TC-E300 (EC)	Тележка для системы, для большинства европейских стран
K10026805	TC-E300 (Великобритания)	Тележка для системы, стандарт Великобритании
A02915A	MAJ-860	Активный шнур для инструментов EndoTherapy, 8 мм
WA99510A	Неудлиняемый кабель	Соединительный кабель для одноразового нейтрального электрода, 4,5 м
E0427245	MAJ-897	Разделенный нейтральный электрод, одноразовый, 10 шт.
WA94041A	Редуктор давления	Стандарт DIN 477-6, центральная и южная Европа
WA94042A	Редуктор давления	Стандарт DIN 477-10
WA94043A	Редуктор давления	Стандарт CGA № 580
WA95621A	Кабель электропитания	4,5 м, с угловой вилкой — большинство европейских стран, тип E/F — EC
WA95623A	Кабель электропитания	4,5 м, с угловой вилкой — Великобритания, тип E/F — Великобритания

Датчики аргоноплазменной коагуляции

Номер для заказа	Артикул	Описание	Длина	Мин. диаметр ин-струментального канала
WA94001A	PA-210K	Аксиальный аргоновый датчик, 10 шт., для бронхов	1500 мм	2,0 мм
WA94002A	PA-211U	Аксиальный аргоновый датчик, 10 шт., для желудка/толстой кишки	2200 мм	2,8 мм
WA94003A	PA-212U	Аксиальный аргоновый датчик, 10 шт., для толстой кишки	2200 мм	3,7 мм
WA94004A	PA-210Z	Аксиальный аргоновый датчик, 10 шт., для тонкой кишки	3000 мм	2,0 мм
WA94005A	PA-211Z	Аксиальный аргоновый датчик, 10 шт., для тонкой кишки	3000 мм	2,8 мм
WA94006A	PA-221U	Латеральный аргоновый датчик, 10 шт., для желудка/толстой кишки	2200 мм	2,8 мм
WA94007A	PA-231U	Радиальный аргоновый датчик, 10 шт., для желудка/толстой кишки	2200 мм	2,8 мм

Neutralelektroden

Номер для заказа	Описание	Площадь соприкосновения
WA99512C	Для новорожденных < 5 кг, 15 шт., с кабелем	40 см²
WA99513A	Для детей 5–15 кг, 100 шт.	70 см²
WA99513C	Для детей 5–15 кг, 15 шт., с кабелем	71 см²
WA99514A	Для взрослых > 15 кг, 100 шт.	140 см²
WA99514C	Для взрослых > 15 кг, шт., с кабелем	140 см²
WA99516A	Универсальный размер > 5 кг, 100 шт.	110 см²
WA99516C	Универсальный размер > 5 кг, 15 шт., с кабелем	110 см²

Технические условия, конструкция и вспомогательное оборудование могут быть изменены производителем без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.

OLYMPUS

ООО ОЛИМПАС МОСКВА

Россия, 107023, г. Москва
ул. Электровзводская, д.27, стр. 8
тел.: +7 (495) 926 70 77
факс: +7 (495) 926 70 72
www.olympus.com.ru

Россия, 199178, г. Санкт-Петербург
3-я линия В.О. д. 62, Лит. А.
тел.: +7 (812) 385-47-90
факс: +7 (812) 385-47-93
www.olympus.com.ru

Украина, 01032, г. Киев
бул. Т. Шевченко, д. 336
тел.: +38 (044) 730-21-57
факс: +38 (044) 594-48-01
www.olympus.com.ru

Казахстан, 050012
г. Алматы, ул. Шевченко
д. 118, оф. 217
тел.: +7 (777) 399-74-96
www.olympus.com.ru